



Brugervejledning til ACUSTICA dansktalende armbåndsur

Denne brugervejledning er gældende for alle varianter af

ACUSTICA

HMI: 106177 - Hvid urskive, sorte tal, læderrem, damestemme

HMI: 106178 - Hvid urskive, sorte tal, læderrem, herrestemme

HMI: 106179 - Hvid urskive, sorte tal, metalrem, damestemme

HMI: 106180 - Hvid urskive, sorte tal, metalrem, herrestemme

HMI: 106181 - Sort urskive, hvide tal, læderrem, damestemme

HMI: 106182 - Sort urskive, hvide tal, læderrem, herrestemme

HMI: 106183 - Sort urskive, hvide tal, metalrem, damestemme

HMI: 106184 - Sort urskive, hvide tal, metalrem, herrestemme

1. Velkommen

Tillykke med dit nye dansktalende- / vibrations ur fra ACUSTICA. Uret er et kvalitetsur og er resultatet af et enestående samarbejde mellem højt kvalificerede schweiziske erhvervsvirksomheder og med det Schweiziske blindforbund (SZB), som projektleder

2. Indhold i kassen

- ACUSTICA dansktalende armbånds ur
- Ladestander med tilhørende USB-kabel
- Strømforsyning
- Brugermanual
- SD-kort og CD. Indeholder brugermanual på PDF, samt på mp3 på Engelsk (Daisy format) og ACUSTICA manager software.



3. Beskrivelse af ur

Hold uret så du kan mærke, at glasset over urskiven er opad og den flade side nedad. På venstre side vil du kunne mærke 2 knapper og på højre side er kronen placeret.

Kronen betegnes fremadrettet som "P". Den øverste knap på venstre side ud for kl. 10 betegnes som "P1" og den nederste knap ud for kl. 8 betegnes som "P2".

VIGTIGT: Det er kun muligt at trykke på knapperne – dvs. det er ikke muligt at dreje eller hive dem ud som det er på mange andre ure!

4. Batteri

ACUSTICA er udstyret med et genopladeligt batteri som oplades ved hjælp af den medfølgende ladestander. Med et fuldt opladet batteri har uret en driftstid på ca. 1 måned.

Ved lav batteristatus, vil uret sige "lavt batteri" hver gang der trykkes for at høre klokken. Hvis uret er indstillet til vibrationer, vil indikationen være i form af en serie af hurtige vibrationer.

Ved meget lav batteristatus, vil begge visere stille sig ud for kl. 12. Det er ikke længere muligt at høre klokken eller føle vibrationer. Genoplad herefter batteriet og nulstil uret. (Se punkt 6.)

VIGTIGT: Genoplad kun batteriet så få gange som muligt og ikke oftere end hver 14. dag da det medfører reduceret batteritid.

5. Opladning af ACUSTICA

Start med at tilslutte kablet fra ladestanderen til den medfølgende strømforsyning eller til et USB-stik på en tændt computer og sørg for at ladestanderen står på et plant underlag.

For at sikre at ACUSTICA er korrekt tilsluttet ladestanderen, skal du gøre følgende:

- 1) Placer ladestanderen foran dig så du har kablet til venstre ud for kl. 11
- 2) Hold uret således, at kronen er på din højre side.
- 3) Placer nu uret i ladestanderen ved først at føre kronen ned i fikseringshullet (ud for kl. 3) og derefter trykke uret forsigtig ned i venstre side (ud for kl. 9)



- 4) Når uret er placeret korrekt vil du høre beskeden "Batteri oplader".

Under opladning med strømforsyning er uret fuldt funktionsdygtigt – dvs. du kan til en hver tid aflytte klokken. Oplades uret med USB kablet tilsluttet via en computer, slukkes uret og alle funktioner deaktiveres og du kan ikke aflytte klokken før uret tages op af ladestanderen.

ACUSTICA kræver en opladningstid på ca. 5 timer til en fuld opladning.

Når uret er fuldt opladet vil du høre beskeden " Velkommen til ACUSTICA"

6. Manuel nulstilling af viserne til kl. 12

Det kan være nødvendigt, at udføre en manuel nulstilling af viserne til kl. 12, hvis f.eks. uret har været ude for et kraftigt slag. Skulle det blive nødvendigt, anbefaler vi man får en seende til at udføre nulstillingen eller evt. indlevere uret til din forhandler.

For at udføre nulstillingen holdes alle tre knapper inde på samme tid i ca. 2 sek. Hvis viserne ikke begge stiller sig på kl. 12 indstilles først "time" viseren ved at trykke på hhv. "P1" eller "P2". Når "time" viseren er indstillet til kl. 12 trykkes på "P". Nu kan indstillingen af "minut" viseren indstilles til kl. 12 på samme måde ved brug af "P1" eller "P2". Når begge visere er justeret til kl. 12 trykkes på "P" og nulstillingen er udført.

Når først uret er nulstillet, kan uret igen justeres uden brug af seende.

VIGTIG: *Vær opmærksom på, at når uret har været nulstillet er også datoen nulstillet til 1. januar 2017 og det er derfor nødvendigt at indstille datoen igen enten manuelt eller ved brug af ACUSTICA Manager Software (Se afsnit 13 ACUSTICA Manager).*

7. Information om ACUSTICA vandtæthed

ACUSTICA tåler ferskvand i stor udstrækning, så du kan roligt beholde det på når du går ud i regnvejr eller vasker hænder. Og skulle du glemme at tage det af når du tager brusebad, så tåler uret også det. Men tag det af når du går i svømmehal eller bader i havet, da uret ikke tåler klor eller saltvand.

8. Tale eller vibrations tilstand

Du kan få klokken at vide enten ved hjælp af tale, vibration eller den visuelle urskive. Hvis du ønsker at høre dato eller alarm, er dette kun muligt ved hjælp af tale. Hvis du kun kan bruge uret ved hjælp af vibration, er det muligt at sætte alarmer ved hjælp af ACUSTICA Manager Software.

For at skifte mellem vibration eller tale, trykkes på "P1" og "P2" samtidig. Ved skift til vibration bekræftes dette med en lang vibration og ved skift til tale vil tiden annonceres.

9. Alarm status (virker kun i taletilstand)

Tryk samtidig på "P" og "P1" for at høre alarminstillingerne. Hvis alarmeren er aktiveret, vil du høre beskeden "Alarmeren er aktiv" efterfulgt af alarmeringspunktet. Hvis alarmeren er deaktiveret, vil du høre beskeden "Alarmeren er ikke aktiv".

Når alarmeren er aktiveret, vil uret enten tale eller vibrere i 2 min. fra det indstillede tidspunkt. Herefter følger en ny alarmering hver dag på samme tid indtil alarmeren deaktiveres manuelt.

Når alarmeringslyden lyder, kan den afbrydes ved at trykke på en af de tre knapper. Ellers slukker den automatisk efter to minutter.
(Der er ikke "snooze" funktion indbygget).

Under indstillinger kan du aktivere og deaktivere alarmeren. Det er også her du indstiller alarmeringspunktet (se mere under punkt 10.5)

10. Brug af uret ved tale

10.1 Aflytte klokken:

Tryk på kronen "P". Uret vil annoncere klokken i digital tid (24 timers format).

10.2 Aflytte dato:

Tryk og hold kronen "P" inde mens du aflytter datoen. Dag, dato og måned vil blive annonceret.

10.3 Justere lydstyrken:

For at øge lydstyrken trykkes på "P1" og for at skrue ned for lydstyrken trykkes "P2". Lydstyrken kan justeres i fem niveauer.

10.4 Justere talehastigheden:

Tryk og hold "P1" inde for at øge talehastigheden og tryk og hold "P2" inde for at mindske talehastigheden. Talehastigheden kan justeres i 4 niveauer.

10.5 Indstillinger:

Tryk samtidig på "P" og "P2" for at åbne indstillingsmenuens første trin, hvor du med "P1" kan aktivere alarmen og med "P2" deaktivere alarmen. Med hvert tryk på "P" kommer du igennem de 6 efterfølgende indstillingstrin, hvor du igen kan justere indstillingerne med henholdsvis "P1" og "P2".

- Indstil alarm – Vælg om alarmen skal være aktiveret eller deaktiveret.
- Indstil alarm timer – Juster alarmtidspunktet (timer)
- Indstil alarm minutter – Juster alarmtidspunktet (minutter)". Minutter justeres med 5 minutters interval. *Du mærker nu en kort vibration, som indikerer du går fra alarmindstillinger til tidsindstilling.*
- Indstil timer – Juster urets timeindstilling

- Indstil minutter - Juster urets minutindstilling
- Indstil måned - Juster månedsindstilling*
- Indstil dag - Juster dagens dato

*Bemærk: Det aktuelle årstal i uret ændres, hvis du i indstillingen af måneden skifter fra december og frem til januar og hvis du fra januar skifter tilbage til december. Da du hverken kan se eller høre årstalsindstillingen skal du, efter du har afsluttet indstillingerne, kontrollere urets datoannoncering. Her skal du være opmærksom på, om ugedagen og dato passer sammen.

F.eks.: Hvis uret indstilles til 1. januar 2017, skal ugedag i annonceringen være søndag, da den 1. januar 2017 er en søndag.

Den mest simple måde at indstille tid og dato er, at du blot anbringer uret i ladestanderen (se fremgangsmåde under punkt 13)

OBS: Når du står i indstillinger og der ikke er foretaget en handling i 10 sekunder, vil uret automatisk gemme de indstillinger, der er foretaget.

11. Brug af uret i vibrations tilstand

Det er muligt at aflæse klokken ved hjælp af korte og lange vibrationer.

- "P" ud for kl. 3 angiver timetal.
- "P1" ud for kl. 10 angiver "tier" minutter.
- "P2" ud for kl. 8 angiver minutter.

Logikken i disse korte og lange vibrationer er, at du tæller hhv. korte og lange vibrationer. En lang vibration angiver **5 enheder** og en kort vibration angiver **1 enhed**.

Eksempel på vibrationsmønster:

En lang og 2 korte vibrationer betyder: $5 + 1 + 1 = 7$

Eksempel på aflæsning af klokken:

Du trykker på "P" (timeknappen): Her får du 2 lange og 4 korte vibrationer.

*Summen af $5 + 5 + 1 + 1 + 1 + 1 = 14$. Dvs. klokken er **14**.*

Herefter trykker du på "P1" (tier minutter): Her får du 3 korte vibrationer.

*Summen af $1 + 1 + 1 = 3$. Dvs. 3 gange 10 minutter = **30** min.*

Herefter trykker du på "P2" (minutter): Her får du 1 lang og 2 korte

vibrationer. Summen af $5 + 1 + 1 = 7$ minutter

*I eksemplet er klokken altså **14:37***

Hvis klokken er 11:07 vil vibrationsmønsteret se sådan ud:

"P" = 2 lange og 1 kort vibration

"P1" = Ingen vibrationer

"P2" = 1 lang og 2 korte vibrationer

OBS: Ved aflæsning af klokken ved hjælp af vibrationer er det vigtigt, at der udføres korte tryk på knapperne, da man ellers vil komme i indstillingsmenuen (Se afsnit 12. Indstilling af uret i vibrations tilstand)

12. Indstilling af uret i vibrations tilstand

Uret kører et 24 timers tidsformat, når det er i vibrations tilstand og dette er også gældende under indstillingen.

OBS: Det er ikke muligt at indstille dato og alarm på uret i vibrations tilstand.

Dette kan kun gøres når uret er i tale-tilstand eller er tilsluttet en computer med programmet ACUSTICA Manager installeret (se afsnit 13. ACUSTICA Manager)


I vibrationstilstand indstilles uret med et langt tryk på henholdsvis "P", "P1" og "P2. Dvs. at du med "P" indstiller antal timer, med "P1" antal tiende minutter og med "P2" antal minutter. Hvis du f.eks. kun vil justere antal minutter, så trykker og holder du "P2" fast, og efter du har mærket den indledende lange vibration, begynder du at tælle de korte vibrationer. Først når antallet af de korte vibrationer stemmer overens med det antal minutter, som du vil indstille uret til, slipper du knappen. Du kan straks aflæse resultatet med et kort tryk på den samme knap, som du har brugt til indstillingen.

Bemærk: Når du indstiller timer, tiende minutter eller minutter, anvendes ikke lange vibrationer for 5 enheder. Dvs. hvis du vil indstille timerne til 11, skal du under indstillingen slippe efter den 11 korte vibrationer. Trykker du herefter kort på samme knap for at kontrollere, bliver det korrekte svar 2 lange + 1 kort vibration (altså 2 gange 5 + 1 = 11).

13. ACUSTICA Manager

ACUSTICA Manager er et program, som medfølger på et memory SD-kort, når du køber et ACUSTICA ur. Programmet skal installeres på en computer. Med programmet kan du automatisk overføre tid og dato fra computeren, samt aktivere/deaktivere alarm og alarmtidspunkter.

Af andre nyttige informationer kan du bl.a. se batteristatus, serienummer og software version. ACUSTICA Manager kører på Windows og sproget er engelsk. Programmet er blevet testet på en computer med Windows 10 og Jaws 18 og kan betegnes som tilgængelig for brugere, som bruger synskompenserende udstyr. Det udelukker ikke, at programmet også virker i andre miljøer. Spørg evt. den danske importør.

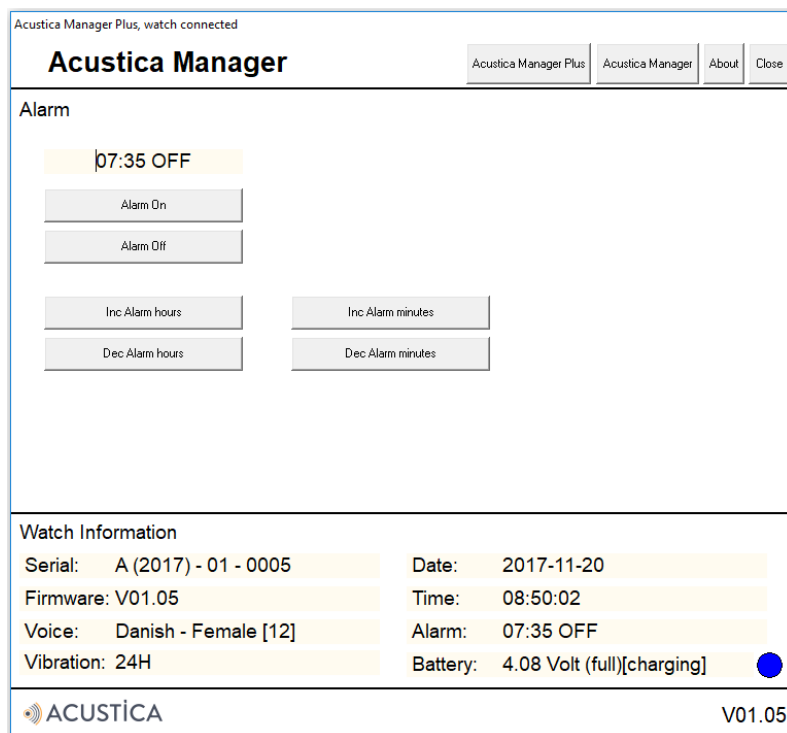

13.1 Installation af ACUSTICA Manager

På det medfølgende SD-kort skal du dobbelt klikke på .exe filen og herefter følge installationsanvisningerne.

13.2 Indstille dato og tid ved hjælp af ACUSTICA Manager

Placer uret i ladestanderen og tilslut den til computeren, hvor ACUSTICA Manager er installeret. Dato og tid vil herefter automatisk overføres til uret. Ved indstilling af sommer/vintertid anbefales det også at starte ACUSTICA manager op og isætte uret i ladestanderen. Uret indstilles herefter automatisk.

13.3 Indstille uret vha. ACUSTICA Manager, hvis du er i anden tidszone

Indstil først klokken til den korrekte tidszone på den PC, hvor ACUSTICA Manager er installeret. Følg herefter ovennævnte vejledning (punkt 13.2).

13.4 Mulige indstillinger ved hjælp af ACUSTICA manager

Tilslut ladestanderen til computeren, hvorpå ACUSTICA Manager er installeret og placer uret i ladestanderen. Åbn ACUSTICA Manager og du har nu følgende muligheder:

- Se indstillet alarmtidspunkt og om alarm er aktiv/deaktiv
- Alarm on (aktivere alarm)
- Alarm off (deaktivere alarm)
- Inc Alarm hours (øge alarm timer)
- Dec Alarm hours (mindske alarm timer)
- Inc Alarm minutes (øge alarm timer)
- Dec Alarm minutes(mindske alarm minutter)

Informationer om uret (ændringer ikke muligt)

- Serienummer
- Firmware (software version)
- Sprog – valgt landesprog og type (mand/dame)
- Vibration - 12 eller 24 timers format
- Dato
- Tid

- Alarm ON eller OFF
- Batteristatus

OBS: Hvis du ønsker at ændre sprog eller at få opdateret uret, kan dette gøres mod betaling og du bedes kontakte din forhandler.

14. Reklamation og reparation

Reklamationsretten er gældende jf. dansk lovgivning.

Reklamationsretten dækker ikke skader påført af bruger eller skader, der er sket ved uheld. Ligeledes dækker reklimationsretten ikke batterier eller urremme, som slides/forringes som følge af almindelig slitage.

Uret kan/må **IKKE** repareres af urmager – ej heller batteriskift, hvis dette skulle blive nødvendigt. Skade forvoldt som følge af forsøg på at åbne ur eller ladestander er ikke dækket af reklimationsretten.

Kontakt altid din forhandler før du sender et ur, uanset om det drejer sig om en reklamation, service- eller reparationsordre, samt firmwareopdatering eller ændring af sprog og stemme. Husk så vidt muligt, at benytte originalemballagen til forsendelse, især når det drejer sig om en reklamation. Det er altid afsenderen, som er ansvarligt for, at forsendelser ankommer til den rette modtager.

15. Bortskaffelse

Dette produkt og dets tilbehør må ikke bortskaffes i husholdningsaffald. For korrekt bortskaffelse skal du enten returnere enheden til din forhandler eller benytte korrekt affaldshåndtering i den gældende kommune. Dette hjælper med at beskytte menneskers sundhed og miljøet. Genbrug af materialer

hjælper med at bevare naturressourcerne. Dette gælder kun i EU-medlemsstaterne og i lande med tilsvarende lovgivning.

16. Hurtigvejledning for ACUSTICA i tale tilstand:

- **Aflytte klokken**
Kort tryk på "P"
- **Aflytte dag/dato**
Langt tryk på "P"
- **Skrue op for lydstyrke**
Kort tryk på "P1"
- **Skrue ned for lydstyrke**
Kort tryk på "P2"
- **Ændre talehastigheden (hurtigere)**
Langt tryk på "P1"
- **Ændre talehastigheden (langsommere)**
Langt tryk på "P2"
- **Skift mellem tale / vibration**
Kort tryk samtidig på "P1" og "P2"
- **Indstilling af alarm, tid og dato (sommer/vintertid)**
Kort tryk samtidig på "P" og "P2" for at komme i indstillingsmenuen.
For at gå videre til næste indstillingstrin trykkes "P"
 - Indstil alarm – tryk "P1" for at aktivere alarmeren eller "P2" for at deaktivere alarmeren.
 - Indstil alarm timer – Juster alarmtidspunktet (timer) ved brug af "P1" og "P2".
 - Indstil alarm minutter – Juster alarmtidspunktet (minutter) ved brug af "P1" og "P2". Minutter justeres med 5 minutters interval.
 - Indstil timer – Juster timer ved hjælp af "P1" eller "P2"

- Indstil minutter - Juster minutter ved hjælp af "P1" eller "P2"
- Indstil måned - Juster måned ved hjælp af "P1" eller "P2"
- Indstil dag - Juster dag ved hjælp af "P1" eller "P2"

- **Høre om alarm er aktiv eller ikke aktiv**
Tryk kort på "P" og "P1" samtidig