



Brugervejledning til DianaTalks & DianaTalks ROYAL dansktalende armbåndsur

DianaTalks er et dansktalende armbåndsur, som kan angive klokken på 2 forskellige tidsformater.

Analog tid: Tirsdag 1 minut over 10 om formiddagen

Digital tid: Tirsdag 10.01

- Knap 1:** Tryk kortvarigt på taleknappen og uret annoncerer ugedag og tid.
OBS: Holdes knappen inde i mere end 5 sekunder slukker uret. For at tænde uret igen holdes taleknappen inde indtil der kommer 2 bip.
- Knap 2:** Kroneknappen: Bruges til at indstille viserne med. Træk kroneknappen ud for at indstille tiden. Når tiden er indstillet trykkes kroneknappen ind igen.
BEMÆRK: Viserne indstilles uafhængig af det talende ur.
- Knap 3:** Knap 3 er en tilbagetrukket knap, som bruges til at indstille de talende minutter med. Brug en spids genstand til at indstille minutterne.
- Knap 4:** Knap 4 er en tilbagetrukket knap som bruges til at indstille de talende timer med. Det er også denne knap, der bruges til at skifte mellem analog tid og digital tid. Tidsformatet skifter automatisk når man passerer 00.00 eller 12 om natten.
- Knap 5:** Knap 5 er en tilbagetrukket knap, som bruges til at indstille ugedagene med.

Valg af sprog

Tryk og hold knap 5 inde i ca. 5 sek. Uret annoncerer nu ugedagen. Tryk indtil det ønskede sprog annonceres. For at gemme indstillingen trykkes på taleknappen.



Udskiftning af batteri

Uret bruger 1 stk batteri som forsyner både talen og viserværket. Lad en urmager udskifte batteriet. I reklamationsperioden anbefaler vi kontakt til Hjælpemidler for Handicappede A/S for at få instruktion. Lader man en urmager udskifte batteriet i reklamationsperioden, bortfalder reklamationsretten, såfremt uret efterfølgende er defekt.

Bemærk

Uret er ikke vandtæt. Bør derfor tages af før håndvask, opvask, bad eller svømning.

Service & support

Hjælpemidler for Handicappede A/S

Sofiendalsvej 88

9200 Aalborg SV

Tlf.: 98 95 42 44