



---

## Brugervejledning til PennyTalks lydmarkeringspen HMI: 73316

---

I toppen af PennyTalks er mikrofon og højttaler placeret. Du finder ligeledes et øje, som den medfølgende rem kan fastgøres i.

Øverst på pennens forside er en grøn lampe som indikerer om pennen er tændt eller slukket.

Under lampen findes 3 knapper:

- Første knap (lille) med 1 taktil mærke er tænd og sluk knappen
- Anden knap (aflang) med 2 taktile mærker er "+ knap" /lydstyrke op
- Tredje knap (aflang) med 3 taktile mærker er "- knap" /lydstyrke ned

Knapperne for lydstyrkeregulering anvendes også som funktionstaster ved optagelse og sletning af notater.

Før pennen tages i brug isættes batterier. Løft batteridæksel på bagside. Indsæt 2 stk AAA batterier (medfølger)

### Indstilling af sprog:

PennyTalks lydmarkeringspennen fra HFH kan tale dansk, svensk, norsk, finsk, engelsk og polsk. Pennen er fra fabrikken indstillet til engelsk tale. For at vælge det sprog du ønsker, skal du anvende medfølgende aflange label med sprog. Tryk på tænd knappen og rør det ønskede sprog med pennens sensor. Pennen vil nu fortælle dig, hvilket sprog der er valgt.

Når pennen ikke har været brugt i 60 sekunder vil den automatisk slukke for at spare strøm.

På Pennens øverste højre og venstre side findes indgange for tilslutning af henholdsvis ørekrog (hovedtelefon) og USB-kabel (tilgang til memory-kort).

Lydingang for tilslutning af ørekrog (hovedtelefonsæt) er markeret med smiley. Når ørekrog tilkobles vil den indbyggede højttaler ikke være aktiv.

I pennens spids findes den sensor som peges mod den selvklæbende etiket.

PennyTalks lydmærkningspennen fra HFH er yderst enkel at anvende. Der medfølger selvklæbende etiketter. Ønsker du flere etiketter, kan de bestilles ved Hjælpemidler for Handicappede A/S på telefon 98 95 42 44 eller mail [hfh@synsnerven.dk](mailto:hfh@synsnerven.dk).

### Indtale og slette beskeder:

For at indtale et notat på en etiket, skal du pege pennens sensor mod den selvklæbende etiket. Er det en ny etiket vil PennyTalks annoncere "Dette er en ny etikette".

Tryk og hold herefter enten "+" eller "-" knappen inde, indtil du er færdig med at indtale din besked. PennyTalks vil starte med at sige "indspil nu" og herefter indtaler du din besked. Når du er færdig slipper du knappen og PennyTalks annoncerer "indspilning er færdig". Du kan nu aflytte det indtalte ved at holde pennens spids ned på den pågældende etiket.

For at slette det indtalte på en etiket, holdes pennens spids ned mod den pågældende etiket. PennyTalks begynder at annoncere det indtalte på etiketten. Hold nu "+" og "-" knapperne inde samtidig og når PennyTalks annoncerer "beskeden er slettet", slippes knapperne igen. Du har nu en ny og tom etiket.

