



---

## Brugervejledning til Colorino farvetester

### HMI: 36998

---

**1. Indledning:**

Tillykke med din nye Colorino farvetester fra Caretec.

Colorino er en lille lys- og farvetester, som kan måle 150 forskellige farvenuancer, samt lysintensitet.

**2. Beskrivelse og anvendelse:**

Med Colorino liggende foran dig og med den smalle ende mod dig selv, vil du på toppen finde 2 knapper, samt en forhøjning med huller hvori højttaleren er placeret. På højre side findes der 2 huller. Det største hul tættest mod den brede ende er til tilslutning af hovedtelefoner. Hullet tættest mod den smalle ende bruges udelukkende til brug for serviceteknikere i forbindelse med fejlfinding på produktet.

I enden på den brede del findes endnu et hul, hvor sensoren til måling af farver og lysintensitet sidder. Vendes Colorinoen rundt, sidder der på bagsiden et batteridæksel, hvorunder der er plads til 2 stk AAA batterier.

Knap 1 – tættest mod den smalle ende:

Bruges til at måle lysintensitet. Hold knappen nede samtidig med du vifter Colorino rundt i lokalet. Det akustiske signal indikerer lysintensitet og afstand til evt. lyskilde. Ved høje toner er lyskilden kraftig eller tæt på. Ved lave toner er lyskilden svag eller langt væk.

Knap 2 – tættest på højtaleren:

Bruges til at måle farvenuance. Hold den brede ende fast og tæt mod det du ønsker at måle farven på. Tryk nu på knappen en enkelt gang og Colorino vil fortælle dig farven. Holdes knappen inde gentages målingen indtil du slipper knappen igen. Høres der et "Biip" når du ønsker at høre en farve, er det fordi Colorino ikke er placeret korrekt ift. til det der ønskes målet.

Lydstyrke:

Det er muligt at vælge mellem 3 forskellige lydstyrker på Colorino, så den tilpasses bedst muligt dit behov.

Hold knap 1 nede samtidig med du trykker på knap 2 indtil du har fundet den lydstyrke, der passer dig bedst.

**3. Rengøring og vedligehold:**

- Brug en let fugtet klud til rengøring af enheden.  
*Colorino tåler IKKE vand og garantien bortfalder såfremt en fejl er afstedkommet pga. vand-/fugtskade.*
- Hvis det bliver nødvendigt at rengøre sensoren, anbefales det at man forsigtigt bruger en ren vatpind.
- Dårlig/svag lyd kan være et resultat af lavt batteri og det anbefales at udskifte disse. Colorino bruger 2 stk AAA batterier.

**God fornøjelse med din nye Colorino**