



Brugervejledning til Voice3000

HMI: 133645

Beskrivelse af Voice3000

Voice3000 er et dansk udviklet ur i tidløst design med automatisk skift mellem sommer- og vintertid. Uret har vækkefunktion og kan fortælle klokken, ugedagen, datoen og temperaturen.

De to stemmer som er indtalt til Voice3000 har en tydelig dansk tale. Der kan vælges mellem en kvinde eller herre stemme. Begge indtalte stemmer har en flot, behagelig og rolig udtale.

Tiden annonceres digitalt - f.eks. klokken er 15:20.

Voice3000 kan både bæres om halsen eller i lommen. Uret leveres med en halsrem, så du altid har uret tæt ved dig. Halsnoren har en lås, så du kan løsne og stramme snoren efter behov. Låsen er samtidig en sikkerhedsforanstaltning mod kvælning idet den vil glide op, hvis du kommer til at hænge fast og snoren strammes om din hals. **Du må derfor ikke binde knude på snoren**

Daglig brug af Voice3000

K1:

Ved tryk på den gule tale knap siger uret klokken.

Når du holder knappen inde, vil uret først fortælle klokken, herefter ugedagen, datoen, årstal og temperaturen.

Uret stopper tale, når du slipper knappen.



K2: Lydstyrke ned

K3: Lydstyrke op

Ved tryk på K2 og K3 kan du regulere lydstyrke.

BEMÆRK:

Når du bærer uret om halsen, så vil kroppen påvirke urets måling af temperatur. Hvis du ønsker at måle temperaturen i rummet eller i køleskabet, så skal det ligge i minimum 1 time for at kunne give korrekt måling.

Advarsel: **Uret tåler ikke fugt eller frost.** Du må derfor ikke bruge det til at måle temperaturen i fryseren eller udendørstemperaturen.

Indstilling af alarm:

Alarm til/fra

For at slå alarm fra tryk samtidig på K1 og K2. Uret siger nu "alarmen er slået fra"

For at slå alarm til tryk samtidig på K1 og K3. Uret siger nu "alarmen er slået til – alarmen er alarmtidspunkt er"

Indstilling alarm timer, minutter og lydstyrke (betjenes med K2+K3 og K1)

For at indstille ønskede alarmtidspunkt tryk og hold K2 og K3 inde samtidig

Uret siger nu "indstil alarmen time er "

Tryk K1 for at komme til indstilling af minutter

Ved næste tryk på K1 kan du indstille alarmstyrke

Knapperne K2 og K3 anvendes i hele alarmmenuen til at vælge tidligere eller senere timetal samt lydstyrke op/ned.

Grundindstilling af uret



Man kan ikke ved et uheld komme til at ændre på urets indstillinger.

For at komme ind i urets menu tryk K4. Du skal bruge en spids genstand (tændstik, kuglepen eller lignende.

K4 giver adgang til urets menu. Brug en kuglepen/tændstik eller lignende.

Den tilbagetrukkne knap findes mellem K2 og K3.

Tryk K4: Uret siger: Indstil minutter – minut er
For lavere minuttal tryk K2
For højere minuttal tryk K3

Ved tryk på K1 kan du bevæge dig frem i menuen:

Minutter

Timer

Dato

Måned

Årstal

Automatisk sommertid til/fra

Valg af stemme (Kvinde eller herre)

Brug K2 (ned) og K3 (op) til at foretage ønskede ændringer i alle menupunkter.

1. Batteriskift

For at skifte batteri i Voice3000 skal du bruge en lille skruetrækker til at løsne skruen på bagsiden.



Voice3000 bruger 2 stk. AAA-batterier på 1,5 volt.
Almindelige Alkaline batterier

Der må **ikke** anvendes genopladelige batterier.

Med fronten afmonteret, er det nu muligt at løfte de brugte batterier op af batteriholder og udskifte med nye.

Hvis batterierne udskiftes indenfor ca. 5 minutter fortsætter uret sin gang under batteriskift. Skulle der gå lidt længere tid med udskiftningen, da vil uret stoppe på tiden. Hvis uret efterlades i længere tid uden batterier, skal der foretages en grundindstilling. Husk dato/årstal, da det er vigtigt for sommer-/vintertidsskift

Uret skal samles korrekt igen, før det må tages i brug.

2. Generelt

Voice3000 er ikke vandtæt. Bør holdes væk fra vand, fugt og hård frost.

(garanti bortfalder ved fugt og væskeskader)

Hvis du ikke bruger uret i lang tid, bør batterierne fjernes fra uret. Herved mindskes risiko for beskadigelse af elektronik, hvis batterierne springer læk.

Begynder uret at opføre sig underligt, sige underlige lyde, miste tid osv., er det ofte tegn på der skal skiftes batterier)

Voice3000 er udviklet og produceret af VoiceDesign en del af Hjælpemidler for Handicappede A/S og Fabers Høreteknik cvr. 30551648.

Har du spørgsmål eller problemer med dit Voice3000, er du velkommen til at kontakte os.