



Brugervejledning til DianaTalks & DianaTalks ROYAL dansktalende armbåndsur

DianaTalks er et dansktalende armbåndsur, som kan angive klokken på 2 forskellige tidsformater.

Analog tid: Tirsdag 1 minut over 10 om formiddagen

Digital tid: Tirsdag 10.01

- Knap 1:** Tryk kortvarigt på taleknappen og uret annoncerer ugedag og tid.
OBS: Holdes knappen inde i mere end 5 sekunder slukker uret. For at tænde uret igen holdes taleknappen inde indtil der kommer 2 bip.
- Knap 2:** Kroneknappen: Bruges til at indstille viserne med. Træk kroneknappen ud for at indstille tiden. Når tiden er indstillet trykkes kroneknappen ind igen.
BEMÆRK: Viserne indstilles uafhængig af det talende ur.
- Knap 3:** Knap 3 er en tilbagetrukket knap, som bruges til at indstille de talende minutter med. Brug en spids genstand til at indstille minutterne.
- Knap 4:** Knap 4 er en tilbagetrukket knap som bruges til at indstille de talende timer med. Det er også denne knap, der bruges til at skifte mellem analog tid og digital tid. Tidsformatet skifter automatisk når man passerer 00.00 eller 12 om natten.
- Knap 5:** Knap 5 er en tilbagetrukket knap, som bruges til at indstille ugedagene med.

Valg af sprog

Tryk og hold knap 5 inde i ca. 5 sek. Uret annoncerer nu ugedagen. Tryk derefter gentagne gange på knap 5 indtil du hører det ønskede sprog. For at gemme indstillingen trykkes på taleknappen.

Udskiftning af batteri

Uret bruger 1 stk. batteri som forsyner både talen og viserværket.

Det første tegn på, at dit ur mangler batteri er, at talen bliver vrøvlet og til sidst helt forsvinder.

Viserværket fungerer ofte stadig, fordi det ikke kræver så meget strøm som taledelen.

Vi anbefaler, at du enten indsender uret til HjælpeMidler for Handicappede A/S eller lader en urmager udskifte batteriet.

Det er vigtigt at være forsigtig når batteriet skiftes. Hvis urets indre dele ved et uheld beskadiges i forbindelse med batteri skift bortfalder reklamationsretten.

Efter et batteriskift vil uret gå tilbage til fabriksindstillinger. Du skal derfor indstille sprog, ugedag, timer og minutter (knap 3, 4 og 5) Se vejledning ovenfor.

Bemærk

Uret er ikke vandtæt. Bør derfor tages af før håndvask, opvask, bad eller svømning.

Service & support

HjælpeMidler for Handicappede A/S

Grøndalsvej 8, Ulbjerg

8832 Skals

Tlf.: 98 95 42 44

hfh@synsnerven.dk

www.synsnerven.dk

Du kan finde en engelsk video som viser batteriskift.

<https://www.youtube.com/watch?v=A6xt3oMxr0U&t=6s>

Her en kortfattet beskrivelse i batteriskift, som du kan medbringe til urmager:

Du skal bruge:

Batteri: Litium CR2025

Vi anbefaler at der anvendes kvalitets batterier
(f.eks. VARTA CR2025)

En syl eller anden spids genstand

En kniv



Billede 1

For at åbne til batterikammer, skal
bagsiden åbnes på samme måde som du
åbner en malerdåse.

Når du vender uret, så er der ud for kl.
11:00 en lille slids hvor du kan vippe/vrikke
kniven og derved få bag pladen til at poppe
af som et låg på en malerdåse.

**Det er vigtigt at du ikke prøver at dreje
bag pladen af, for så risikerer du at
beskadige højttalerdelen.**



Billede 2



Billede 3

Batteriet frigøres ved at sætte din
spidse genstand ned i det lille hul, og
vippe den op. Pas på at dit værktøj ikke
smutter ind og ridser printpladen

Når det nye batteri sættes i, så husk at
vende plus siden op, som vist på
billedet.



+/- Batteriterminaler
Kontroller at de ikke er irret
Og pas på de ikke
bøjes/knækker



Printplade må ikke ridses

Lille hul til at vippe batteri op

De to små fjedre må ikke
bøjes
De vil blive beskadiget hvis
du drejer bag pladen af i
stedet for at vippe den af
som et malerdåse som
beskrevet ovenfor.

Billede 5

Når du sætter bag pladen på igen, så
sørg for at de to huller er henholdsvis
kl. 12:00 og kl. 06:00

**Det er vigtigt at den lille slids er
placeret kl. 11:00**

Hvis bag pladen monteres forkert kan
batteri ikke få kontakt, og uret er tavs.



Billede 6