




Brugervejledning til TimeVox

HMI: 109643

1. Beskrivelse af TimeVox

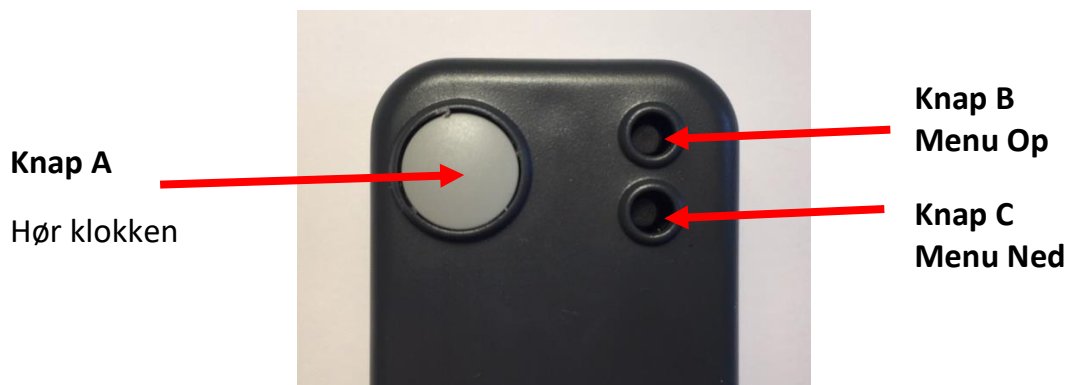

TimeVox er et dansktalende bord-/lommeur med indbygget vækkeurs funktion. Uret kan indstilles til at fortælle klokken på 2 forskellige måder:

- Digital tid :Eksempel på digital tid: *Klokken er 15.15*
- "Gammeldags" tid: Eksempel på gammeldags tid: *Klokken er kvart over tre om eftermiddagen*

Uret leveres som standard på "gammeldags" tid

Uret har 3 knapper på fronten, hvoraf "taleknappen" i øverst venstre hjørne er den eneste lettilgængelige knap. Til højre for taleknappen er 2 nedsænkede knapper, som kun kan aktiveres ved brug af en spids genstand (kuglepen, tændstik osv.).

Nederst på fronten bag perforeringen er urets højttaler placeret.

2. Hvordan bruges TimeVox

Urets halssnor har en lås, så du kan løsne og stramme snoren efter behov. Låsen er samtidig en sikkerhedsforanstaltning mod kvælning idet den vil glide op, hvis du kommer til at hænge fast og snoren strammes om din hals. **Du må derfor ikke binde knude på snoren**

Sådan aflyttes tiden: Ved at trykke kort på knap A, får du at vide hvad klokken er. Ved at trykke og holde knap A nede indtil den annoncerer en ugedag, vil uret meddele den aktuelle ugedag, dato og måned og evt. alarmtidspunkt, hvis alarmen er aktiveret.

3. Justering af lydstyrke



I bunden af TimeVox (modsat ende af "taleknap") findes en lille tilbagetrækket skrue til justering af lydstyrken. Benyt en lille fladkærvet skruetrækker.

Bemærk: For at høre mærkbar forskel på lydstyrken, skal der drejes op til flere gange på skruen.

4. Indstilling af tid og alarm

OBS: For at indstille alarm, tid og dato, skal du bruge en spids genstand (tændstik, kuglepen eller lignende til at trykke på hhv. knapperne "B" og "C".

Alarm til/fra: For at aktivere eller deaktivere alarmen trykkes på knappen "C". Uret annoncerer for hvert tryk om "alarmen er slået til" eller om "alarmen er slået fra".

Urets menu: Ved at trykke på knap "B" kommer du nu ind i menuen, hvor det er muligt at indstille alarmtidspunkt, tid og dato

Menuen er opbygget i en fast rækkefølge. Se nedenfor

For at bladere frem til næste menupunkt tryk knap A


Når du står i det menupunkt som du ønsker at ændre, så kan du trykke op/ned på knap B og C

1. Alarmen er sat til timetal
2. Alarmen er sat til minuttal
3. Alarmsignal

4. Tidsindstilling timetal
5. Tidsindstilling minuttal

6. Datoindstilling ugedag
7. Datoindstilling dato
8. Datoindstilling måned
9. Datoindstilling årstal

Knap A – Tryk for næste menupunkt

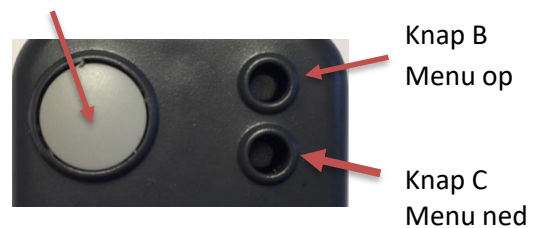

For hver indstillingsmulighed er det muligt at ændre værdien (op/ned).

Knap "B" øger du værdien og med knap "C" mindsker du værdien. For at gå til næste indstillingsmulighed trykkes på knappen "A". Ønsker du ikke at ændre en indstilling trykkes blot på knap "A" for at gå videre.



De redigerede indstillinger er gemt når uret afgiver 2 "bib" lyde. Dette sker enten ved:

1. at der ikke trykkes på nogle knapper i lidt over et minut.
2. at trykke på knap "A" gentagne gange indtil uret afgiver 2 "bib" lyde.
3. at trykke og holde knap "A" nede indtil det afgiver 2 "bib" lyde.

5. Skift mellem digital-/gammeldags tid.

Digital tidsannoncering:


jumper nærmest B/C knapper flyttes så tredje ben står fri

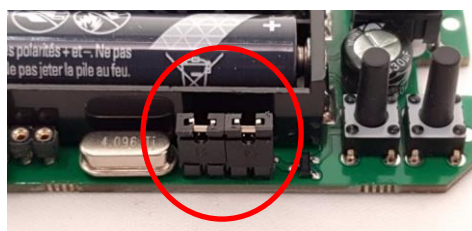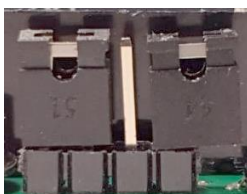

Gammeldags tidsannoncering:

Begge sorte "jumper" skal være monteret på de 4 ben.

(Standard indstilling)

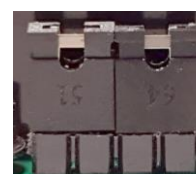

For at skifte mellem digital-/gammeldags tidsannoncering, skal de 3 skruer på bagsiden skrues af og du kan nu fjerne fronten.

Som vist på billedet er det nu muligt at flytte den sorte "jumber" alt efter om man ønsker en digital eller gammeldags tidsannoncering.

Ønskes gammeldags tidsannoncering (som er standard) skal begge jumpere være monteret på de 4 ben. Ønsker man digital tidsannoncering skal jumperen nærmest knap B og C løftes så ben 3 står fri.

*Bemærk: Man kan **ikke** få stød ved at røre de elektroniske dele*

6. Batteriskift

For at skifte batteri i TimeVox, skal de 3 skruer på bagsiden skrues af og fronten fjernes.

Med fronten afmonteret, er det nu muligt at udskifte de 2 AAA batterier som er monteret i en batterikasse. Udskiftes batterierne indenfor ca. 45 sekunder fastholdes tid og dato som før batteriskift. Skulle der gå lidt længere tid med udskiftningen, vil uret blive nulstillet og du vil høre 2 "bib" når du trykker på taleknappen første gang. Er det tilfældet skal uret indstilles på ny og der henvises til punkt 4, hvor tidsindstilling er beskrevet.

7. Generelt

- TimeVox er ikke vandtæt. Bør holdes væk fra vand og fugt. *(garanti bortfalder ved fugt og væskeskader)*
- Uret er udstyret med 2 AAA batterier på 1,5 volt (almindelige Alkaline batterier). Der må **ikke** anvendes genopladelige batterier. (Begynder uret at opføre sig underligt, sige underlige lyde, miste tid osv., er det ofte tegn på der skal skiftes batterier)

Har du spørgsmål eller problemer med dit TimeVox, er du velkommen til at kontakte os.