



# Zeitzgeist 2

Er et multifunktional lommeur.

DA

I Zeitzgeist 2 finder du ikke blot mange funktioner, men også funktioner som man ikke umiddelbar vil forvente i et lommeur. Ved udviklingen blev der lagt vægt på, at uret bliver en mangesidig og nyttig hjælp, når du er på farten, og langt væk fra dine standardhjælpemidler såsom din Computer. Ligeledes udnyttede man nutidens nyeste teknologi. Zeitzgeist 2 kan bæres i den medfølgende halsstrop eller blot som lommeur.

Urets akustiske informationer fås via en syntetisk men naturligt klingende stemme og små melodier (såkaldte Jingles). Desuden kan den taktile tidsannoncering vha. en vibrator lydløs fortælle dig det aktuelle klokkeslæt.

Selvom Zeitzgeist 2 blev udviklet med fokus på synshandicappede brugere, kan også seende personer få gavn og glæde af produktets mange og nyttige funktioner.

### I Leveringsomfang er:

- Zeitzgeist 2 (7x4x1 cm, 29 gram)
- Bærestrop
- USB-strømforsyning
- USB-ladekabel (USB-A til USB-C)
- Brugsvejledning: På tryk og digitalt på USB-nøgle.



### Vedligeholdelse af uret:

Zeitzgeist 2 blev udviklet til at være holdbar i mange år. Men for at opnå dette mål, kræves også brugerens opmærksomhed. Enheden er ikke vandtæt, derfor skal den holdes væk fra væsker. Generelt, skal du sørge for, at der ikke kommer fremmede legemer ind i enhedens åbninger (Gitterafdækning over højttaler og mikrofon).


### Strømforsyning:

Indbygget Lithium-Polymer-Akku (batteri) med 400 mAh kapacitet, som oplades via et USB-C-kabel. (OBS: Ved en USB-C-Stikforbindelse er det ligegyldigt hvilken vej stikket vender.) (Bemærk: Via USB-forbindelsen i Zeitzgeist 2, foretages ingen datatransmission.) Batteriets driftstid efter en fuld opladning, kan variere fra et par uger og op til nogle måneder, og afhænger af enhedens brugsmønster.

## Den grundlæggende betjening

Zeitgeist 2 blev primært udviklet med akustisk output vha. syntetisk tale, som understøttes af små signalmelodier, de såkaldte "Jingles". Det reflekterende og grafikkompatible display er kun tænkt som en supplement til seende personer såsom servicepersoner, teknikker, samt andre seende personer, som også gerne vil bruge Zeitgeist 2 i deres hverdag. Hvert tastetryk besvares med et haptisk (vibrerende) signal.

Når man er på **hovedskærmen**, altså når der ikke blev trykt på en tast i nogle sekunder, vises de vigtigste basisinformationerne på skærmen, såsom klokkeslæt, dato, og øverst til højre: Batteriets opladningsstatus. Øverst til venstre vises den aktuelle driftstilstand med tilsvarende symboler. (se afsnit 2.3 i betjeningsvejledningen). Befinder Zeitgeist 2 sig i en af undermenuerne, vises dem aktuelle input- eller outputsituation på dette sted, som understøttelse til den akustiske output.

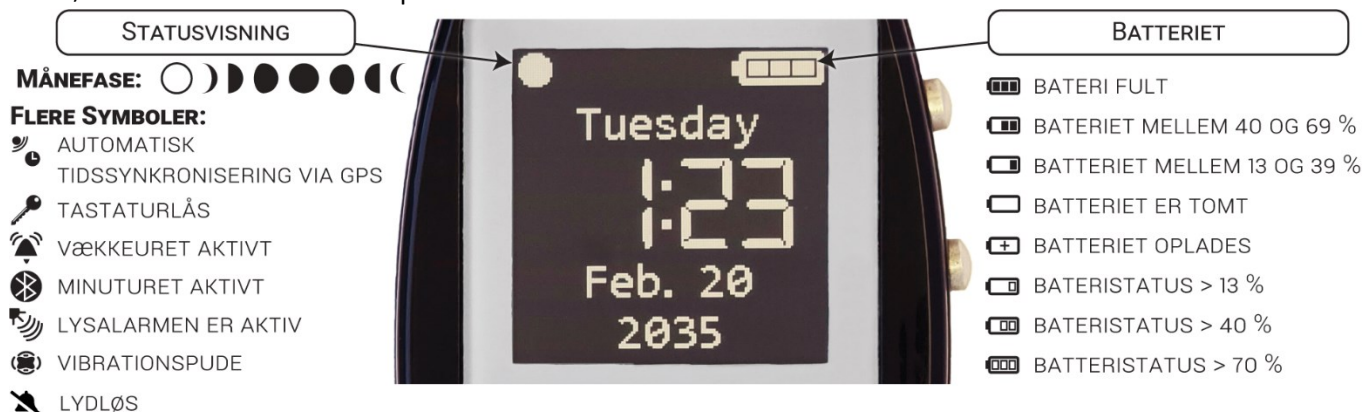

Næsten overalt bruger Zeitgeist 2 såkaldte rullemenuer, dvs. når du scroller op og ned, bevæger du dig i en cirkel, fx ved valg af måned, følger januar efter december.

Ved de tre knapper adskilles varigheden af knaptrykket mellem **KORT** og **LANG** (LANG er ca. et sekund). Tasternes anvendelse ligner hinanden i mange af funktionerne:

- Et **KORT** tryk på den **øverste** eller **nederste** knap ruller OP eller ned eller skifter tilstand f.eks. mellem "fra" og "til").
- Et **LANGT** tryk på den **midterste** knap aktiverer et menupunkt.
- Et **kort** tryk på den **midterste** knap, afspiller informationer vedr. det aktive menupunkt. Med yderlige korte tryk kommer man videre indenfor kæden af indstillingsmulighederne.

Eksempel: Ved indstilling af et tidspunkt i kalenderen hopper man med et **KORT** tryk på den **midterste** knap fra indstillingen af år til måned og videre til dag. Ved hvert skift til næste indstillingsposition, gemmes den forudgående indstilling.

Desuden er **tastekombinationer**, hvor to taster trykkes samtidig, ligeledes differentieret i **KORTE** eller **LANGE** tryk. Den vigtigste og universel gældende tastekombination er et **KORT** tryk på samtidig **øverste + nederste** tast, som afslutter den aktuelle funktion, og fører dig tilbage til hovedskærmen (kan sammenlignes med funktionen "Escape").

		ØVERSTE TAST	MIDTERSTE TAST	NEDERSTE TAST
HOVEDSKÆRM	KORT DRØYK	AKTUEL TIDSANNONCERING	INFO ON DET SENEST AKTIVE MENUPUNKT	- ANNONCERING AF DATO OG UGENUMMER - MÅNEFASE OG ANTAL DAGE TIL NYMÅNED
		STATUS OVER AKTIVE VÆKKEURALARMER		INFO OM AKTIVE KALENDERBEGIVENHEDER
		AKTUEL BATTERILADETILSTAND		
	LANGT DRØYK	TIDSANNONCERING VIA VIBRATION	START HOVEDMENUEN	START LUMITEST (LYSMELDER)
		AUTOMATISK TIDSSYNKRONISERING VIA GPS	GENVEJ TIL OPTAGELSE AF ET STEMME NOTAT	
		RESET (SKAL HOLDES FAST I 12 SEKUNDER)		

Umiddelbar fra hovedskærmen er det også muligt at navigere direkte til bestemte funktioner:

- Annoncering af klokkeslæt (taktil via vibrator, se Kapitel 5.1.1)
- Akustisk annoncering af klokkeslæt og dato.
- Tastaturlås og reset.

### Oversigt over funktionerne i hovedmenuen med referencer til de respektive punkter i BETJENINGSVEJLEDNINGEN.

- Stopur ..... Kapitel 6.1
- Minutur ..... Kapitel 6.2
- Alarm (vækkeur) ..... Kapitel 6.3 / 6.3.1
- Kalender ..... Kapitel 6.3 / 6.3.2
- Notatrekorder ..... Kapitel 6.4
- Lumitest (lysmelder) ..... Kapitel 6.5 / 6.5.1
- Kompas ..... Kapitel 6.6
- Skridttæller ..... Kapitel 6.7
- Spil (*undermenu*) [Skakur, terning, 8 Ball] ..... Kapitel 6.8 med 3 underpunkter
- Menstruationskalender ..... Kapitel 6.9
- Indstillinger (*undermenu*) ..... Kapitel 7 med 10 underpunkter

Hovedmenuen startes fra hovedskærmen, med et **LANGT** tryk på **midterste** tast.

De enkelte funktioner rulles igennem med **KORTE** tryk på **øverste** eller **nederste** tast.


Hvis der ikke trykkes på nogen tast i cirka 10 sekunder, vender enheden, med et lille bip, tilbage til hovedskærmen.

Med et **KORT** tryk på **midterste** tast fås en informationsmeddelelse vedr. den aktuelle funktion. Du kan f.eks. høre, hvor mange kalenderposter eller stemmenotater, som allerede findes.

Nogle sådanne oplysninger kan også kaldes direkte fra hovedskærmen vha. de respektive tastekombinationer (såkaldte genvejstaster).

Et **LANGT** tryk på **Midterste** tast, starter hovedmenuen.

Nogle funktioner kan fortsætte med at køre i baggrunden, mens displayet igen vender tilbage til hovedskærmen.

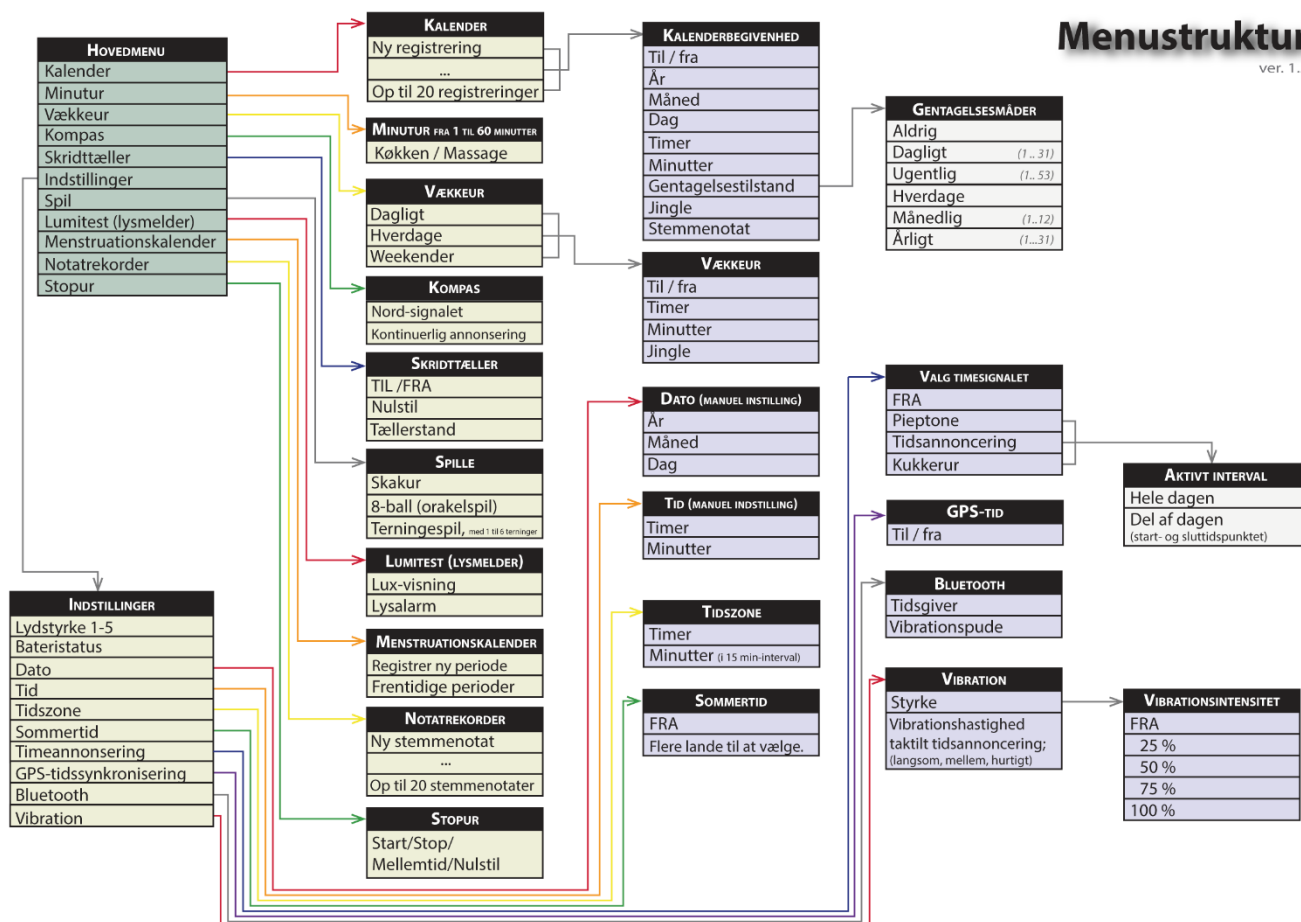

## Grundlæggende gælder følgende for alle funktioner:

Et hvert tastetryk genererer et passende stemmeoutput! Men nogle funktioner, fx skak-uret, skal indstilles, før funktionen kan startes. Andre, såsom stopuret er klar til brug med det samme.

## Systemindstillinger (undermenu Indstillinger) med reference til BRUGERVEJLEDNINGEN

For at hente de respektive systemindstillinger frem, vælg undermenuen Indstillinger i hovedmenuen, Med **KORTE** tryk på **øverste** eller **nederste** tast kommer du gennem menuen. Funktionerne startes med et **LANGT** tryk på **midterste** tast. Som i hovedmenuen annoncerer også her, et **KORT** tryk på **Midterste** tast, funktionens aktuelle indstillinger. Ligesådan gælder også her Betjeningsprincipperne. dvs., at man kan ændre numeriske værdier eller vælge forskellige muligheder med **KORTE** tryk på **øverste** eller **nederste** tast. Med et **KORT** tryk på **midterste** tast, kan du bekræfte dit valg, og skifte videre til de følgende indstillingsmuligheder.

Hvis du vil annullere midt i en indstilling, kan du komme tilbage til hovedskærmen som sædvanligt med et **KORT** tryk på samtidig **øverste + nederste** tast. (Forudgående indstillingsændringer bliver hermed annulleret.)

- Lydstyrke ..... Fem lydstyrkeniveauer, kapitel 7.1
- Batteri..... Batteristatus i procent, kapitel 7.2
- Manuelt justerbar dato og klokkeslæt ..... Kapitel 7.3
- Tidszone..... timeinterval mellem Greenwich-middeltid og lokaltid, kapitel 7.4
- Sommertid.....Automatisk tidskift mellem sommer/vintertid, kapitel 7.5
- Nulstil til fabriksindstillinger / annoncering af softwareversionsnummer ..... kapitel 7.6
- Timeannoncering med .....(bip, kukker eller, aktuelle klokkeslæt), kapitel 7.7
- GPS-Tidssynkronisering .....(tidsjustering via GPS-Satellitter), kapitel 7.8
- Bluetooth..... (valgfri vibrationspude til at forstærke vækning med vibration), kapitel 7.9.1
- Indstilling af Vibration ..... (ved tidsannoncering og taktile feedback), kapitel 7.10

## Administrative informationer

- Tekniske Data ..... Kapitel 8
- Sikkerhed und bortskaffelse..... Kapitel 9 und 9.1
- Garanti, Service og producent..... Kapitel 10 und 10.1

	<p>Zeitgeist 2 blev udviklet og fremstillet af: CareTec International GmbH Stubenbastei 1 A-1010 Wien Østrig</p> <p>Telefon: (+43 1) 513 80 81 - 0 Fax: (+43 1) 513 80 81 - 9 Email: <a href="mailto:office@caretec.at">office@caretec.at</a> Web: <a href="http://www.caretec.at">www.caretec.at</a></p>	
---	---	---

CareTec har siden 1988 udviklet og produceret talende- og taktile hjælpemidler til stærk svagsynede, blinde, døve og farveblinde.

Deres produkter er tilgængelige til salg i mange lande gennem deres distributører:

Herunder simple værktøjer såsom batteritester, strømpesortere, braille-labelskriver, møntboks, skabeloner til genkendelse/ måling af pengesedler og mønter til over 1 million brugere i mange lande.

Sofistikerede produkter såsom enheder til taktile frihåndstegning og geometrisk tegning på specielle folier, farve- og lysgenkendelse-sanordninger, køkken- og badeværelsesvægte, kommercielle og videnskabelige lommeregner, etiketlæsere, ultralydsenheder til detektering af forhindringer, batteriopladere, talende målebånd, flere blinde ure og hvide stokke.

Priser: "Louis Braille-Award" fra den tyske og "Winston Gordon-Award" fra Canadian Association of the Blind; førstepræmien og fem anerkendelser fra "Mercur" i Wiens Handelskammer.