



Brugervejledning til PENfriend2

HMI: 86375

Generel beskrivelse

Med PENfriend2 kan du optage beskeder på selvklæbende labels og derved markere genstande i hjemmet ved brug af din egen stemme. Der kan optages op til 1 time for hver enkelt label. Der kan i alt gemmes op til 125 timers optagelser på det interne 4 GB hukommelseskort.

Tilbehør der følger med til PENfriend2

- 1 x PENfriend2
- 105 x labels i forskellige størrelser
- 1 x Nøglevedhæng
- 1 x halssnor
- 2 x AAA batterier
- 1 x opbevaringskasse

Orientering

Vend PENfriend2 således, at den spidse ende vender nedad og knapperne vender mod dig. Sørg for at PENfriend2 holdes i denne position, så du nemt kan identificere knapperne og de mange tilgængeligheder.

OBS: DET ER UD FRA DENNE POSITION, AT KNAPPER OG STIKFORBINDELSER BESKRIVES.

Lær din PENfriend2 at kende

I den tykke ende sidder højttaler/mikrofon og det er ligeledes her halssnoren fastgøres.

Ved start fra toppen (den tykke ende) er knapperne som følger:

- 1) Tænd/sluk knap.
- 2) Optageknap
- 3) Volume regulering
- 4) MENU knap

På venstre side af PENfriend2 er der 2 huller. Det øverste hul er for tilslutning af hovedtelefoner og det nederste hul er til USB-tilslutning. (BEMÆRK: USB-tilslutningen bruges ikke til at oplade enheden med, men udelukkende til at forbinde PENfriend2 og PC. Kablet er ikke inkluderet i pakken)

På bagsiden er batteridækslet placeret. Der benyttes 2 stk AAA-batterier. For at skifte batterierne fjernes batteridækslet. De brugte batterier kan nu fjernes og nye kan isættes. PENfriend2 benyttes udelukkende med Alkaline batterier. Det er ikke muligt at genoplade batterier i PENfriend2.

Tænd/sluk for din PENfriend2

Tænd/sluk knappen er nummer 1 fra oven. For at tænde PENfriend2 holdes tænd/sluk knappen inde i ca. 2-3 sekunder. Det røde lys lige over tænd/sluk knappen vil tænde og blive efterfulgt af et kort "BIB". For at slukke PENfriend2 holdes tænd/sluk knappen inde i 2-3 sekunder og du vil høre et langt "KLING" som indikerer enheden slukker. Er enheden tændt og ikke har været brugt i 10 minutter, vil enheden automatisk slukke. Dette bekræftes ligeledes ved hjælp af et langt "KLING".

Optageknappen

Optageknappen er nummer 2 fra oven. Når PENfriend2 er tændt, er den klar til at optage. For at optage holdes optageknappen inde. Mens optageknappen holdes inde føres den tynde ende ned på den label, der ønskes op taget på. Enheden afgiver et "BIB", som indikerer at den optager og du skal nu slippe optageknappen igen. Hold nu den tykke ende ca. 20 cm fra munden og indtal besked. Når du er færdig med at indtale beskeden trykkes kortvarigt på optageknappen. Der afgives et "BIB" som indikerer at optagelsen er afsluttet og beskeden er gemt. Hvis du ønsker at indtale en ny besked på samme label, gentages ovennævnte procedure.

Afspilning af optaget besked

For at aflytte en optagelse, skal du blot lade den tynde ende på din PENfriend2 røre den pågældende etikette. Hvis det er en længere besked du aflytter og du ønsker at holde en pause i beskeden, så tryk/slip hurtigt tænd/sluk knappen. Oplæsning af beskeden er nu stoppet. For at fortsætte, så tryk/slip hurtigt tænd/sluk knappen igen.

Volume

Volumeknappen er nummer 3 fra oven. For at skrue op og ned for lyden trykkes på knappen flere gange indtil den ønskede lydstyrke er opnået. Den indstillede lydstyrke gemmes som standard næste gang enheden tændes.

MENU-funktioner

MENU knappen er nummer 4 fra oven. Ved hjælp af MENU knappen på PENfriend2 kan du skifte mellem 3 funktioner som er:

- 1) Optage funktion (standard)
- 2) Lydfil funktion
- 3) MP3 funktion

Hver gang du tænder for PENfriend2, starter den op i "Optage funktion". Det er den funktion, der typisk er mest brugt.

For at skifte til "Lydfil funktion" holdes MENU knappen nede indtil enheden afgiver 2 "BIB". Det røde lys skifter nu til blå. "Lydfil funktionen" har 2 funktioner:

- 1) Indtalte beskeder, som ikke ønskes slettet, kan konverteres til "lydfiler" via PC.
- 2) Man kan købe bøger (primært engelske børnebøger) som kan læses op af PENfriend2.

For at skifte til "MP3 funktion" holdes knappen nede igen indtil der afgives 3 "BIB". Det er nu muligt at høre MP3 musik som er overført til PENfriend2 via PC.

For at komme tilbage til "Optage funktion" igen, holdes knappen nede indtil der høres 1 "BIB"

Backup

Hvis du har adgang til en computer, har du mulighed for at tage backup af dine optagelser. For at gøre dette, skal du blot forbinde din PENfriend2 ved hjælp af et USB kabel (medfølger ikke). Din computer vil vise at din enhed – PENfriend2 - er fundet. Du skal herefter åbne enheden (drevet) og du vil finde 3 folders:

AP4, REC og MP3.

For at tage backup af dine optagelser, skal du kopiere REC folderen og sætte den ind i en ny folder, eksempel c:\penfriend. For at gendanne en optagelse fra din computer til din PENfriend2 skal du blot kopiere din backup tilbage til din PENfriend2 enhed. Husk altid at kopiere filer og ikke blot flytte dem.

Spørgsmål til din PENfriend2

Har du spørgsmål din nye PENfriend2 eller har du brug for hjælp til at komme i gang, er du altid velkommen til at kontakte Hjælpemidler for Handicappede. Vi vil gøre vores bedste for du kommer godt i gang og du får maksimal udnyttelse af din PENfriend2. **GOD FORNØJELSE.**