

Kvikguide til TimeVox dansk talende ur

Her en kort introduktion til hvordan du bruger uret i dagligdagen. For uddybende vejledning om indstilling af uret henvises til brugervejledningen.

Knap A

Hør klokken



Hvordan bruges TimeVox?

Urets halssnor har en lås, så du kan løsne og stramme snoren efter behov. Låsen er samtidig en sikkerhedsforanstaltning idet den vil glide op, hvis du kommer til at hænge fast og snoren strammes om din hals. **Du må derfor ikke binde knude på snoren.**

Ved at trykke kort på Knap A, får du at vide hvad klokken er. Ved at trykke og holde knap A nede vil uret meddele den aktuelle ugedag, dato og måned og evt. alarmtidspunkt, hvis alarmen er aktiveret.

Justering af lydstyrke

I bunden af TimeVox (modsat ende af "taleknap") findes en lille tilbagetrukket skrue til justering af lydstyrken. Benyt en lille fladkærvet skruetrækker.

Bemærk: For at høre mærkbar forskel på lydstyrken, skal der drejes op til flere gange på skruen.

