



Brugervejledning til TimeVox 2

HMI: 148463

1. Kom godt i gang

TimeVox er et talende ur med tydelig dansk tale.

Uret kan fortælle:

- Klokkelæt
- Dato
- Ugedag
- Alarmtid

Uret har tre knapper:

Knap A

- Hør klokkeslæt
- Hør dato og ugedag
- Gem indstillinger

Knap B

- Åbn menu
- Ændr indstillinger

Knap C

- Slå alarm til eller fra
- Ændr indstillinger



2. Hør klokken, dato og ugedag

Hør klokken

Tryk kort på knap A. Uret fortæller det aktuelle klokkeslæt

Hør dato og ugedag

Hold **knap A** nede. Uret fortæller derefter: Ugedag, Dato og Måned

Hvis alarmen er slået til, fortæller uret også alarmtidspunktet.

Brug alarmen

Slå alarm til eller fra: Tryk kort på knap C.

Uret fortæller, om alarmen er slået til eller fra.

Stop alarmen

Tryk på en vilkårlig knap, når alarmen ringer.

3. Vigtig information

TimeVox er ikke vandtæt.

Bør holdes væk fra vand og fugt. (*garanti bortfalder ved fugt og væskeskader*)

Sikkerhed ved brug af halssnoren.

Halssnoren er udstyret med en sikkerhedslås, som kan justeres efter behov.

Sikkerhedslåsen er konstrueret til at åbne sig, hvis snoren bliver strammet omkring halsen, f.eks. hvis den hænger fast i noget. For at bevare denne sikkerhedsfunktion, må der ikke bindes knuder på snoren eller foretages ændringer af sikkerhedslåsen

4. Automatisk sommer- og vintertid

TimeVox 2 skifter automatisk mellem sommer- og vintertid.

Du behøver derfor ikke selv at ændre tiden, når der skiftes mellem sommer- og vintertid.

Funktionen er indbygget i urets software og kræver ikke internetforbindelse.

Hvis tiden bliver forkert, kan du altid indstille den manuelt.

5. Indstil alarm, tid og dato

Åbn menuen

Tryk på **knap B**.

Uret guider dig gennem menuens forskellige punkter.

Navigering i menuen

- Tryk på **knap A** for at gå til næste punkt.
- Brug **knap B** eller **knap C** til at ændre værdien.
- Hold **knap A** nede for at gemme og afslutte.

Når uret afgiver to bip, er indstillingerne gemt.

Menuens punkter

- Alarm – timer
- Alarm – minutter
- Alarmlyd
- Klokkelæt – timer
- Klokkelæt – minutter
- Ugedag
- Dato
- Måned
- År



6. Valg af tidslæsning

TimeVox kan benytte to forskellige måder at fortælle tiden på.

Analog tidsoplæsning (standard indstilling)

Eksempel: "Klokken er femogtyve minutter over to."

Digital tidsoplæsning


Eksempel: "Klokken er fjorten femogtyve."

Valg af tidsoplæsning foretages med omskifteren i batterirummet.

Analog tidsannoncering:


Begge sorte "jumper" skal være monteret på de 4 ben.

(Standard indstilling)

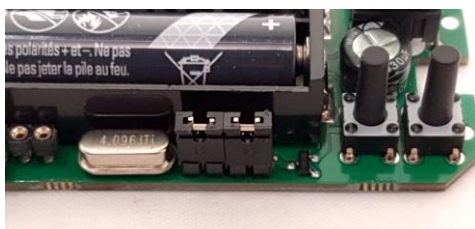

Digital tidsannoncering:

jumper nærmest B/C knapper flyttes så tredje ben står fri

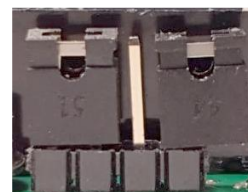

7. Batteriskift

TimeVox bruger 2 stk. AAA alkaline-batterier.

Sådan skifter du batterier

1. Åbn batteridækslet.
2. Fjern de gamle batterier.
3. Isæt to nye AAA alkaline-batterier. Der må **ikke** anvendes genopladelige batterier
4. Kontroller, at plus (+) og minus (-) vender korrekt.
5. Luk batteridækslet.

Hvis uret taler utydeligt eller opfører sig usædvanligt, bør batterierne udskiftes.

8. Justering af lydstyrke



I bunden af TimeVox (modsat ende af "taleknap") findes en lille tilbagetrukket skrue til justering af lydstyrken. Benyt en lille fladkærvet skruetrækker.

Bemærk: For at høre mærkbar forskel på lydstyrken, skal der drejes op til flere gange på skruen.

Har du spørgsmål eller problemer med dit TimeVox, er du velkommen til at kontakte os.